



## **Carpofix® ,textile type**

Orthese zur Stabilisierung des Handgelenkes

**Material:** Neopren, Jeans, Polyester "coolquick", PU-Schaumstoff, Polyester „spacer fabric“ Velcro, Plastik-Schnallen, Aluminium

### **Indikation:**

Undislozierte distale Radiusfraktur loco classico oder metapypsär, dislozierte Radiusfraktur loco classico mit Eigenstabilität nach Reposition, also relativ kleiner dorsaler Trümmerzone, frische Bänderupturen im Bereich des Carpus, Zustände nach Luxationen, Zustände nach Bandrekonstruktion und Arthrodesen

### **Kontraindikation :**

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

### **Applikation:**



Velcrobänder lösen, Orthese und das elastische Inlay öffnen und über Hand und Unterarm ziehen. Der Daumen wird dabei durch die dafür vorgesehene Öffnung geführt. Inlay Fausch auf Haken verschließen. Orthese provisorisch mit den am ulnaren Rand angebrachten 2 kleineren Velcrobändern verschließen.

Einstellen des korrekten Sitzes im Bereich des Handgelenks. Die Köpfchen der Mittelhandknochen sollten am Ende der Orthese frei liegen. Der dorsale Stabilisator muss dem Handrücken anliegen. Bei nicht richtigem Sitz muss er entfernt und durch Rotation zwischen proximalem und distalem Ende nachgeformt werden.

Velcrobänder 2-4 im Bereich des Unterarmes durch die Platikschnallen führen und via Beugeseite am radialen Velcrostreifen fixieren. Dabei sind die freien Ränder des Neoprenteils gleichsinnig zu überlappen und Faltenbildung zu vermeiden.

Kompression der dorsalen gegen den volaren Stabilisator am distalen Ende der Orthese und Verschluss des im Bereich des Handrückens lokalisierten Velcrobandes.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Schmerzen im Bereich des Handgelenks sind Hinweis auf einen nicht optimalen Sitz der Orthese, was zu Druckschäden der Haut führen kann. Ggf. muss der behandelnde Arzt konsultiert werden.

### **Größen:**

Art. Nr.

85211-85214, Small - X-Large, Links

85216-85219, Small – X-Large, Rechts

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

