



Bauchbandage MP

Bandage zur Entlastung der Bauchdecke

Materialien: Elastisches Multipanel-Material (Nylon 57%/Polyester 12%/Latex 31%), Schaumstoff, Stahlfedern

Indikation: Postoperative Entlastung der Bauchwand, Bauchwand-Hernien, Bindegewebsschwäche, Hängebauch.

Kontraindikation: Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien . Besonders **Latexallergie**.

Applikation:



Gewebeschützendes Stoffelement vom Hakenvelcro entfernen. Bandage so am Rücken positionieren, dass das Etikett oben und der Hakenvelcro am Ende der Bandage rechts liegt. Beide Enden der Bandage zwischen Langfingern und Hohlhand erfassen. Bandage durch Zug nach vorne anspannen und unter Überlappung der Enden mit der gewünschten Spannung verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht anwenden bei Latexallergie. Keine defekten Produkte verwenden

Größen: Universal

Art.- No.	Bauchumfang
85261 Small	< 80 cm
85262 Medium	80 – 100 cm
85263 Large	100 – 120 cm
85264 X- Large	>120 cm

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

