



## Post OP Genu Classic Knielagerungsschiene

Orthese zur Behandlung posttraumatischer und postoperativer Zustände

**Materialien:** Hautfreundliches Frottée, selbsthaftendes Nylon, Jeans, Schaumstoff, Alu-Stäbe, Velcro

**Indikation:** Verletzung des Kapsel-Bandapparates und der Menisci. Zustände nach Kapsel-Bandrekonstruktion. Frakturen, die keine Ruhigstellung der angrenzenden Gelenke erfordern (z.B. undislozierte Frakturen der Patella und des Tibiakopfes). Zustand nach Patella-Luxation. Akute Bursitis, St. n. Bursektomie. Akute Schmerzzustände bei rheumatischen Affektionen, Tendoperiostosen.

**Kontraindikation:** Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien.

### Applikation:

Seitliche Stäbe (je 2) aus den Behältern ziehen und durch Formung den Konturen des Beines an dessen Innen- und Aussenseiten anpassen. Bei den Varianten mit 10° bzw. 20° Biegung sollte der Krümmungsscheitel des Stabilisators etwa auf Höhe des inneren bzw. äusseren Gelenkspaltes liegen. Stäbe in Behälter zurückschieben. Dabei darauf achten, dass die nun formveränderten Stab-Paare auf der richtigen Seite eingesetzt werden. Bei Stabilisatoren mit 10° oder 20° Biegung müssen die kürzeren Teile im Oberschenkelbereich, die längeren im Unterschenkelbereich, zu liegen kommen. Velcrobänder mobilisieren und das Bein auf der ausgebreiteten Knieschiene lagern. Schiene unter Überlappung der oberen Ränder schliessen. Die Kniescheibe sollte danach im Zentrum der dafür vorgesehenen Aussparung lokalisiert sein. Velcro-Bänder durch die Schnallen führen und in Gegenrichtung mit Haken auf Flausch fixieren.



### Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Druckstellen muss die konturgerechte Formung der Stabilisatoren überprüft und ggf. angepasst werden.

### Größen:

Art. No.

85850 - 85853 52 cm S -XL 180°

85801 - 85804 56cm S -XL 10° 85816 - 85819 60cm S -XL 10°

85806 - 85809 56cm S -XL 20° 85820 - 85823 60cm S -XL 20°

85811 - 85814 56cm S -XL 180° 85825 - 85828 60cm S -XL 180°

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

