



Tarsofix®

Orthese zur Stabilisierung des Rückfußes

Material: Jeans, Schaumstoff, gelochtes Neopren, Baumwoll-Frottée, elast. Nylon, Velcro, Stabilisator aus Polyethylen.

Indikation:

Konservative Behandlung von Kapselband-Rupturen im Bereich beider Sprung-gelenke und des Chopart-Gelenkes. Nachbehandlung nach Bandnaht oder plastischer Bandrekonstruktion der Sprunggelenke. Konservative Behandlung stabiler Malleolar-Frakturen. Nachbehandlung nach Osteosynthese. Konservative Behandlung der Basisfraktur des Os Metatarsale V sowie kapsulärer Ausrissfrakturen der Fußwurzelknochen.

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



Velcro-Bänder mobilisieren, Orthese öffnen und mit dem Fuß zwischen Sohlenteil und elast. Nylon schlüpfen bis die Ferse optimal in der dorsalen Aussparung hinter der Sohle platziert ist. Schnüren des Sockens im Fußbereich. Platzieren der Zungen lateralwärts und Schnüren im Bereich des Unterschenkels. Fixation des symmetrisch an der Sohle des Stabilisators platzierten Velcrobandes unter Überkreuzung am Fußrücken, proximalwärts am Innen- bzw. Aussenknöchel. Anziehen eines geeigneten Schuhs (vorzugsweise Sportschuh) unter Verwendung des mitgelieferten Schuhlöffels.

Vorsichtsmaßnahmen:

Schmerzen in der Knöchelregion oder an der Fußsohle sind ein Hinweis auf einen nicht optimalen Sitz des Stabilisators und können durch dessen Abänderung oder Wechsel behoben werden. Gegebenenfalls ist zur Vermeidung von Druckschäden an der Haut der behandelnde Arzt zu konsultieren.

Infolge der Oberflächenbeschaffenheit des Kunststoff-Teiles besteht Rutschgefahr auf glatten Böden. Die Orthese sollte deshalb nur in Kombination mit einem geeigneten Schuh oder Socken verwendet werden.

Größen:

88020-88023, S-XL, links

88024-88027, S-XL, rechts

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

