



Handgelenkstütze, grün/blau, gepolstert

Orthese zur Immobilisation des Handgelenks in Funktionsstellung

Material: Elastisches Nylon, PU Schaumstoff, Polyester-Frottee, Aluminium, Velcro, Materialien m. Hautkontakt entsprechen ÖkoTex 100 Standard

Indikation:

Postoperative, posttraumatische Zustände und entzündliche Erkrankungen im Bereich des Handgelenkes

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



- Velcrobänder lösen und die Stütze auf einer Unterlage ausbreiten
- Handgelenk und Vorderarm mit Zentrierung auf den Stabilisator lagern
- Zunächst die Velcrobänder im Bereich des Vorderarmes locker schliessen
- Zug in Richtung Ellbogen zur Optimierung des Sitzes im Handgelenksbereich
- Velcrobänder zwischen Daumen und Zeigefinger schliessen, ev. Nachziehen der übrigen Bänder
- Das lange Velcrobänder zirkulär um das Handgelenk führen und fixieren

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Druckbeschwerden oder Durchblutungsbeschwerden den korrekten Sitz der Orthese überprüfen, überprüfen ob die richtige Größe gewählt wurde Stabilisator nachformen lassen, ggf. den behandelnden Arzt aufsuchen. Verletzungsgefahr besteht bei einer defekten Aufnahmetasche des Aluminiumstabilisators, sofort reparieren oder austauschen lassen.

Größen:

85090 - 85094 23 cm XS - XL, links

85095 - 85099 23 cm XS - XL, rechts

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

