



## **Intrinsic Plus1-Finger-Schiene, grün/blau, gepolstert**

Orthese zur Ruhigstellung des Zeige- Mittel- oder Ringfingers

**Material:** Elastisches Nylon, PU Schaumstoff, Polyester-Frottee, Aluminium, Velcro, Materialien m. Hautkontakt entsprechen ÖkoTex 100 Standard

### **Indikation:**

Erfordernis der Ruhigstellung traumatisierter oder operierter Finger in intrinsic plus Stellung zur Vermeidung von Kontrakturen der Fingergrundgelenke

### **Kontraindikation :**

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

### **Applikation:**



- Velcrobänder lösen und Schiene öffnen
- Finger darin lagern. Darauf achten, dass dabei das Handgelenk in Funktionsstellung und der Finger in Intrinsic plus Stellung zu liegen kommen
- Der Winkel der Flexionsstellung in den Fingergrundgelenken kann wunschgemäß modifiziert werden
- Schiene schließen, ev. unter Überlappung der gesäumten freien Ränder
- Velcrobänder befestigen

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Bei Druckbeschwerden oder Durchblutungsbeschwerden den korrekten Sitz der Orthese überprüfen, überprüfen ob die richtige Größe gewählt wurde Stabilisator nachformen lassen, ggf. den behandelnden Arzt aufsuchen . Verletzungsgefahr besteht bei einer defekten Aufnahmetasche des Aluminiumstabilisators, sofort reparieren oder austauschen lassen.

### **Größen:**

Art. Nr.:

87001 small	Handgelenkumfang < 16 cm
87002 medium	Handgelenkumfang 16-19 cm
87003 large	Handgelenkumfang 19< cm

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland  
OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland  
**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.



