



SSB / Schulter-Stabilisierungsbrace

Orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenkes in Aussenrotation

Materialien: Selbsthaftendes Polyester, Frottee aus Polyester, PV Schaumstoff, Velcro, Neopren. Stabilisator aus Aluminium mit Scharniergelenken und Arretierungsschrauben. Materialien mit Hautkontakt entsprechen Öko Tex 100 Standard.

Indikation: Konservative Behandlung der frischen vorderen-unteren Schultergelenk-Luxation Postoperativ nach hinterer Schultergelenk-Stabilisierung.

Kontraindikation: Verletzungen der Rotatorenmanschette. Beannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien .

Applikation:



Öffnen des Arnteils und Lagerung des Armes in der gepolsterten Aluminiumschiene, Verschluss mit den Velcrobändern.

Korrektes Platzieren des mit dem Armteil über ein schwenkbares Scharniergelenk verbundenen Thoraxteiles frontal.

Einstellung der gewünschten Rotation im Schultergelenk: Durchführen der am Thoraxteil fixierten Schraube durch das entsprechende Loch des Verbindungsstabes, Befestigung der Schrauben-Mutter.

Mobilisation des am Oberarmteil fixierten Gurtes, Herumführen desselben um den Thorax.

Verschluss Haken auf Flausch je nach Körpergröße am Oberarm oder Rücken.

Befestigen der Schultergurte mit dem klettbaren Teil am Rücken, danach Fixation der beiden Gurte frontal.

Vorsichtsmaßnahmen:

Druckbeschwerden in der Axilla sind zu vermeiden. Dazu müssen die korrekte Position der Orthese und die richtige Lage des Stabilisators nach Wechsel des textilen Teiles überprüft werden.

Eine der individuellen Anatomie entsprechende Nachformung der Stabilisatoren durch eine autorisierte Fachkraft ist möglich.

Bei sonstigen Druckbeschwerden sollte überprüft werden ob die richtige Größe gewählt wurde. Ferner ist die Spannung der Velcrobänder zu überprüfen.

Größen:

Art.- No. 87081 – 87083, Small – Large, Links

87086 – 87088, Small – Large, Rechts

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

