



Armschlinge Mitella mit Polster

Armtrageschlinge

Material: Nylon-Gurte, Plasticschnalle, Nackenpolster aus Frottee

Indikation:

Verletzungen im Bereich des Schultergürtels, entzündliche Erkrankungen der Schulter, postoperative Ruhigstellung.

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



Gurte über dem Nacken platzieren und den Arm in Ellenbogennähe so wie im Handgelenkbereich in den beiden Schlingen am Gurtende lagern. Einstellen der der korrekten Länge mit der verstellbaren Schnalle. Der entspannt hängende Arm sollte im Ellenbogen etwa rechtwinkelig gebeugt sein. Zentrieren des verschiebbaren Frottee-Teils zur Nackenpolsterung

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Druckbeschwerden oder Durchblutungsbeschwerden den korrekten Sitz der Armschlinge überprüfen.

Größen:

Universalgröße

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

