



Postoperative Thoraxbandage

Bandage zur Stabilisierung des Brustkorbes

Materialien: Elastisches Multipanel-Material (Nylon/Polyester/Latex), PU-Schaumstoff, Jersey, Nylon, Flausch und Hakenvelcro, Handgriffe und Schnallen aus Leichtmetall.

Indikation: Drohendes Schmerzereignis bei postoperativen und Posttraumatischen Zuständen (Mobilisation, Husten, Niesen etc.), instabile Osteosynthese nach Thorakotomie

Kontraindikation: Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien. Besonders **Latexallergie**.

Einstellen der passenden Länge: Zum Erreichen einer ausreichenden Kompressionswirkung durch annähern der Handgriffe müssen die beiden Enden der Bandage einen minimalen Abstand haben und etwa auf Höhe der Mamillen lokalisiert sein. Dazu sind die Hakenvelcro-Elemente an beiden Enden zu lösen und die Handgriffe zu entfernen. Letztere müssen danach mittels dem am Handgriff fixierten Hakenvelcro-Überzug entsprechend dem Thoraxumfang neu am Flausch des gepolsterten Anteils der Bandage befestigt werden (bei einem Brustumfang von 100 cm in der Mitte, bei kleineren oder größerem Brustumfang weiter oder näher vom Bandagenende entfernt). Schließlich wird der endständige Hakenvelcro-Teil um den Handgriff geschlagen und fixiert.

Applikation:



Platzieren der Bandage unterhalb der Achselhöhlen. Dabei sollen die Metallschnalle links, das Velcroverschlussband rechts und die Schultergurte außen lokalisiert sein. Mobilisieren des Velcrobandes, durchführen zwischen Bandagenende und Handgriff rechts und durch die Schnalle links. Lockerer Verschluss des Bandes Haken auf Flausch. Die dorsal mittels Klettverschluss fixierten Gurte werden über beide Schultern nach vorne geführt und seitlich der Handgriffe befestigt. Die Länge der Gurte kann über die Metallschnallen variiert werden. Um eine Kompressionswirkung zu erzielen, müssen die Handgriffe erfasst und mit einer Hand so lange erforderlich vor dem Brustbein zusammengehalten werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Keine defekten Produkte verwenden. Die korrekt eingestellte Bandage nur locker verschließen um respiratorische Komplikationen zu vermeiden.

Größen: Universal

Art.- No.	Brustumfang (unter Achsel)
85301 X- Small	< 80 cm
85302 Medium	80 – 120 cm
85303 X- Large	>120 cm

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland
OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

