



## Dreiteilige Knielagerungsschiene

Orthese zur Behandlung posttraumatischer und postoperativer Zustände

**Materialien:** Hautfreundliches Frottée, selbsthaftendes Nylon, Jeans, Schaumstoff, Alu-Stäbe, Velcro

**Indikation:** Verletzung des Kapsel-Bandapparates und der Menisci. Zustände nach Kapsel-Bandrekonstruktion. Frakturen, die keine Ruhigstellung der angrenzenden Gelenke erfordern. Zustand nach Patella-Luxation. Akute Bursitis, St. n. Bursektomie. Akute Schmerzzustände bei rheumatischen Affektionen, Tendoperiostosen.

**Kontraindikation:** Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien .

### Applikation:

Entfernen der beiden seitlichen Anteile, die mit Velcro an den zentralen Körper fixiert sind. Herausziehen der Stabilisatoren (je 2 Alu-Stäbe). Individuelle Formung der Stabilisatoren entsprechend der Konturen des Beines an der Innen- und Außenseite. Bei Varianten mit 10° bzw. 20° sollte der Krümmungsscheitel der Alu-Stäbe auf Höhe der Gelenksspalten liegen. Dann die Stäbe in die Behälter zurückschieben. Darauf achten, dass die nun formveränderten Stabilisatoren auf der richtigen Seite eingesetzt werden. Bei Stabilisatoren mit 10° und 20° Beugung müssen die kürzeren Teile im Oberschenkelbereich, die Längeren im Unterschenkel-bereich zu liegen kommen. Refixation der beiden seitlichen Anteile am zentralen Körper, an derjenigen Position, die der individuellen Weite entspricht. D.h. je grösser der Beinumfang ist, desto weiter entfernt vom dorsalen Stabilisator muss die Befestigung der seitlichen Teile erfolgen. Dysproportionen zwischen Unterschenkel- und Oberschenkelweite erfordern eine entsprechende schräge Refixation. Velcroanteile an der unteren Begrenzung der Stabilisatoren fest an der selbsthaftenden äußeren Schicht der zentralen Orthesenteile andrücken. Velcrobänder mobilisieren und das Bein auf der ausgebreiteten, dreiteiligen Kniechiene lagern. Schiene unter Überlappung der Ränder schließen. Die Kniescheibe sollte danach im Zentrum der dafür vorgesehenen Aussparung lokalisiert sein. Velcrobänder durch die Schnallen führen und in die Gegenrichtung ziehen, fixieren bzw. andrücken.



### Vorsichtsmaßnahmen:

Druckstellen sind Hinweise auf nicht korrekte Formung oder Lokalisation der Stabilisatoren und können durch entsprechende Korrektur beseitigt werden

### Größen:

Art.- No.	Länge/Beugung	Art.- No.	Länge/Beugung
85757	56 cm 0°	85759	56 cm 10°
85754	56 cm 20°	85758	60 cm 0°
85760	60 cm 10°	85755	60 cm 20°

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

