



Thoraxbandage MP

Stabilisierungsbandage für den Brustkorbe

Materialien: Elastisches Multipanel-Material (Nylon 57%/Polyester12%/Latex31%), Schaumstoff, Flausch, Hakenvelcro, Frottee.

Indikation: Postoperativer Support nach Sternotomie und anderen Thoracotomien. Posttraumatisch nach Sternum- oder Rippenfraktur und Thoraxkontusion

Kontraindikation: Bekannte Allergie gegen eines oder mehrere der verwendeten Materialien . Besonders **Latexallergie**.

Applikation:



Bandage unter Überlappung der Velcroschichten an den Enden Haken auf Flausch bei der gewünschten Spannung verschließen. Dabei auf eine symetrische Position achten. Diese liegt dann vor, wenn die Oberarme bei hängenden Armen nicht an der Bandage ventral oder dorsal anstoßen, sondern Platz in den seitlichen axillaren Aussparungen finden. Die beiden Traggurte über die Schultern nach vorne führen und mit dem Hakenvelcro am Flauschteil der Bandage ventral befestigen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Keine defekten Produkte verwenden. Bei Allergie auf Latex darf das Produkt nicht verwendet werden.

Größen: Universal

| Art.- No. | Brustumfang (unter Achsel) |
|---------------|----------------------------|
| 85251 Small | < 80 cm |
| 85252 Medium | 80 – 100 cm |
| 85253 Large | 100 - 120 cm |
| 85254 X-Large | 120 < cm |

Trocken lagern

Die Garantie und die Gewährleistung liegen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

