



Knie Stabilisierungs-Bandage MP

Hilfsmittel zur Stützung des schmerzhaften, instabilen Kniegelenkes

Material: Nylon (57%), Polyester (12%), Latex (31%), Velcro, Stahlfedern.

Indikation: Frische Kapselbandlaesionen des Kniegelenkes. Meniscus-verletzungen. Postoperativ nach Bandrekonstruktionen. Chronische Kniegelenksinstabilität. Degenerative und entzündliche Erkrankungen.

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien, insbesondere Latex, nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



Velcroverschlüsse ober- und unterhalb der Patella-Aussparung öffnen und die 4 seitlich fixierten elastischen Bänder lösen. Bandage in der Kniekehle platzieren. Der weitere, mit der Größenbezeichnung markierte Teil muss im Oberschenkelbereich, der schmalere unterhalb des Knies positioniert sein. Bandage mit der gewünschten Spannung Haken auf Flausch verschließen. Die Kniescheibe muss dabei frei bleiben. Die je zwei elastischen Bänder im Oberschenkel- und Unterschenkelbereich unter Zug überkreuzen und Haken auf Flausch am oberen bzw. unteren Ende der die Stabilisatoren beinhaltenden Taschen befestigen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Latex-Allergie darf die Bandage nicht verwendet werden. Venöse Stauungen durch richtige Größenwahl vermeiden. Bandage bei Venenerkrankungen mit einem Stützstrumpf kombinieren.

Größen:

Art.- Nr.		Knieumfang
88076	Small	<36 cm
88077	Medium	36 – 40 cm
88078	Large	40 – 44 cm
88079	X-Large	44< cm

Links und Rechts zu verwenden

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

