



## **Kniebandage MP**

Hilfsmittel zur Stützung des schmerzhaften, instabilen Kniegelenkes

**Material:** Nylon (57%), Polyester (12%), Latex (31%), Velcro.

**Indikation:** Bänderverletzung des Kniegelenkes. Schmerzhaftes Kniegelenk. Rehabilitationsphase postoperativ, nach Ruhigstellung. Degenerative und entzündliche Erkrankungen. Sportsupport bei Restbeschwerden.

### **Kontraindikation:**

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien, insbesondere Latex, nicht zum Einsatz kommen.

### **Applikation :**



Bandage öffnen und in der Kniekehle platzieren. Der weitere, mit der Größenbezeichnung markierte Teil muss im Oberschenkelbereich, der schmalere unterhalb des Knies positioniert sein. Bandage mit der gewünschten Spannung Haken auf Flausch verschließen. Die Kniescheibe muss dabei frei bleiben.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Bei Latex-Allergie darf die Bandage nicht verwendet werden. Venöse Stauungen durch richtige Grössenwahl vermeiden.

### **Größen:**

Art.- Nr.		Knieumfang
88070	Small	< 35 cm
88071	Medium	35 – 40 cm
88072	Large	40 < cm

Links und Rechts verwendbar

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland  
OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

