



Protect Soft Handgelenk-Bandage

Neue Ausführung

Material: Baumwolle (65%), Nylon (10%), Spandex (25%), Velcro

Indikation: Kapselbandlaesionen am Handgelenk. Sehnenscheiden-Entzündungen, Sehnenansatz-Reizungen. Support nach Ruhigstellung und postoperativ.

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien besonders bei Latexallergie nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



- Den zirkulären Schlüpfteil unter Berücksichtigung der Seitenbezeichnung über die Hand stülpen und auf Höhe des Handgelenkes platzieren.
- Das freie elastische Band um das Handgelenk führen und mit der gewünschten Spannung Haken auf Flausch fixieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Durchblutungsbeschwerden den korrekten Sitz der Bandage überprüfen. Bei Latex-Allergie darf die Bandage nicht verwendet werden.

Größen:

Art. No.:	Handgelenkumfang
85640 Small	< 16 cm
85641 Medium	16 – 18,5 cm
85642 Large	18,5 < cm

Links und rechts verwendbar

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland
OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

