



OMNIMED® Ortho Manu CTS

Orthese zur Immobilisation des Handgelenks und Entlastung des Carpal-Tunnels

Material: Selbsthaftendes Polyester, Frottee aus Polyester „Coolquick“, PU-Schaumstoff, Spandex, Aluminium, Stahlfedern, Plastikschnallen, Velcro

Indikation:

Entlastung des Carpal-Tunnels bei peripherem Kompressionssyndrom des Nervus medianus. Ruhigstellung des Handgelenkes posttraumatisch, postoperativ und bei entzündlichen Erkrankungen.

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



Velcro-Bänder lösen und die Stütze auf einer Unterlage ausbreiten. Orthese bei beugeseitig liegendem Aluminium-Stabilisator und radialsseitig lokalisierter Anziehhilfe (Verbindungsgewebe aus Spandex) über Hand und Unterarm ziehen. Die Position der Orthese ist korrekt, wenn die Mittelhandköpfchen frei liegen und der Stabilisator der Hohlhand anliegt. Verschluss der Orthese bei der gewünschten Spannung durch Fixation der durch schnallen als Umkehrzügel vorgelegten Velcro-Bänder beugeseitig und der separaten zwischen Daumen und Zeigefinger verlaufenden Velcroeinheit streckseitig.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei Druckbeschwerden oder Durchblutungsbeschwerden den korrekten Sitz der Orthese überprüfen, überprüfen ob die richtige Seite und Größe gewählt wurde Stabilisator nachformen lassen, ggf. den behandelnden Arzt aufsuchen . Verletzungsgefahr besteht bei einer defekten Aufnahme tasche des Aluminiumstabilisators, sofort reparieren oder austauschen lassen.

Größen:

SX50203-50206 S - XL, rechts
SX50213-50216 S - XL, links

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland
OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

