



Armschlinge nach Gilchrist

Geeignet zur Ruhigstellung des Schultergelenkes

Material: Nylon, hautfreundliches Frottée, Schaumstoff, Polyacrylnitril

Indikation:

Postoperativ nach Eingriffen an der Schulter / Konservative Behandlung von Frakturen des proximalen Humerus und der Scapula / Zustände nach Luxation, Kontusion

Kontraindikation:

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

Applikation :



- Hand in die mit der Schulterklappe versehene Öffnung des Strumpfes einführen und den Strumpf überziehen. Dabei Faltenbildung vermeiden und auf Freiheit der Finger und richtige Position der Schulterklappe achten.
- Die kürzere Gurte über den Nacken zur Gegenseite führen, danach entlang dem Thorax unter dem Handgelenk durchziehen, streckseitig um das Handgelenk führen und unter Bildung einer Schlinge Haken auf Flauschanteil der Gurte verschließen. Eine Torsion der Gurte muss vermieden werden, die Frottée-Innenschicht dem Körper anliegen.
- Die längere Gurte um den Thorax zum Rücken führen, unter dem im Strumpf gelagerten Arm durchziehen, um den Oberarm führen und in Gegenrichtung unter Bildung einer Schlinge Haken auf Flauschanteil auf dem Rücken fixieren.
- Die separaten Velcroschlingen oberhalb des Handgelenkes und medial des Oberarmes unter Erfassen beider Schlingenteile der Gurten verschließen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Zur Vermeidung einer Schnürwirkung auf die Haut, v. a. im Nackenbereich, muss eine Torsion der Gurten vermieden werden. Der Frottéeanteil sollte auf der Haut aufliegen.

Größen:

Art. Nr.: 87060-87063, Small - X-Large

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

