



## Ortho RhizoFix

Daumen-Handgelenkbandage

**Material:** Spacer fabric (Polyester), Spandex, Velcro, Plastikschnallen, Aluminium, Federn aus Stahl

### **Indikation:**

Postoperativ nach Osteosynthese des Kahnbeins und anderen Eingriffen im Bereich des Handgelenks und des Daumen-Grundgelenks. Posttraumatisch nach Kontusion, Distorsion, Luxation. Entzündliche Erkrankungen der carpalen Gelenke und Sehnen.

### **Kontraindikation:**

Das Produkt darf bei bekannter Allergie gegen eines oder mehrerer der verwendeten Materialien nicht zum Einsatz kommen.

### **Applikation :**



Alle Velcroverschlüsse lösen. Orthese entlang der beuge und radialseitig liegenden Alu-Stabilisatoren unter Einbezug des Daumens über Hand und Unterarm ziehen. Zunächst Fixation des Daumens durch Herumführen des endständig mit Hakenvelcro versehenen Verschlussbandes senkrecht zur Daumenlängsachse, danach Verschluss schräg dazu auf dem Flausch der Stabilisatortasche. Anziehen der beiden vorgelegten Velcrobänder, distal durch zwei und proximal durch eine Plastiksnalle und Verschluss der Orthese mit der gewünschten Spannung Haken auf Flausch.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

Wahl der richtigen Größe. Aadaequate Dosierung des Verschlussdrucks. Keine defekten Produkte verwenden.

### **Größen:**

SX24301-SX24304 23 cm S - XL, rechts

SX24311-SX24314 23 cm S - XL, links

Trocken lagern

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren.

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, CH 9016 St. Gallen, Switzerland

OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG St. Gallen, Switzerland

**Vertrieb D: TRIAMED GmbH & Co. KG, D 59348 Lüdinghausen**

Die Entsorgung ist Sache des Anwenders. Dabei sind die lokalen gesetzlichen Anforderungen zu berücksichtigen.

